

Spielend einfache Mittelohrdiagnostik für Kinder RaceCar-Tympanometer



- Kindgerechte Impedanzmessung – der Mittelohrtest wird zum Spiel
- Farbenfrohes Design mit animiertem Autorennen im Display
- Hochtympanometrie mit 1000 Hz für Kleinkinder
- Sehr einfache Bedienung und Auswertung
- Vollautomatischer Testablauf – sekundenschnelles Tympanogramm
- Stapediusreflexmessung mit 4 Frequenzen
- Auch in der Version mit integriertem Tonaudiometer erhältlich

Spielerische Tympanometrie und Reflexmessung mit dem RaceCar-Tympanometer

Animiertes Autorennen

Während die Kinder auf der eingebauten LCD-Anzeige das Autorennen verfolgen, läuft im Hintergrund automatisch die Messung ab. Hat der kleine Patient stillgehalten, so gewinnt er das Rennen. Bewegt er sich während der Messung, muss "das Rennen" wiederholt werden.

Hochfrequenztympometrie

Kinder im ersten Lebensjahr können mit 1000 Hz getestet werden. Dies führt zu deutlich besseren Ergebnissen.

Schnelle Mittelohrdiagnose

Die Messung des Tympanogramms startet automatisch. Bei der anschließenden Reflexmessung mit vier Frequenzen erhöht das Gerät den Pegel solange bis ein Reflex auftritt oder der Maximalwert erreicht wird. Zum Schutz empfindlicher Ohren kann der maximale Pegel individuell vorgewählt werden. Die gesamte Messung dauert ca. 15 Sekunden.

Einfache Bedienung

Einfach die Sonde im Ohr platzieren und die Messung startet. Die Mess-Sonde kann in drei Winkelstufen zur optimalen Ergonomie eingestellt werden. Das Ergebnis beider Ohren wird gespeichert und kann schnell und leise ausgedruckt werden. Name und Anschrift der Praxis werden automatisch eingefügt.

Individuelle Einstellungen

Über die eingebaute Menüfunktion lässt sich das RaceCar-Tympanometer leicht an spezielle Bedürfnisse anpassen. Hier kann z. B. zwischen Autorennen und Anzeige der Messung im Display umgeschaltet werden.

Version Audiotyp

In der Version RaceCar Audiotyp ist ein Schnelltest-Tonaudiometer für Luftleitung über 8 Frequenzen integriert. Die Audiometrie ist nach EBM 04332 mit 240 Punkten abrechenbar. Die gemessenen Audiogramme werden für beide Ohren grafisch dargestellt. Sensortasten dienen als Tonunterbrecher bzw. -geber.



RaceCar

Technische Daten

Tympanometer:

Messfrequenz, -pegel	226 Hz \pm 1%, 85 dB _{SPL} in 2 cm ² , 1000 Hz
Druckbereich	+ 200 bis - 400 daPa
Volumenbereich	0,1 bis 6,0 ml
Messgenauigkeit	\pm 5% bzw. \pm 10 daPa
Testzeit	< 3 Sekunden

Reflexmessung:

Testfrequenzen	500, 1000, 2000, 4000 Hz \pm 2%
Messmethode	ipsilateral, contralateral (optional)
Testpegel ipsilateral	70 ... 105 dB _{HV}
Testpegel contralateral	70 ... 110 dB _{HV}
Pegeleinstellung	automatisch oder manuell
Messprogramm	Reflexmessung abschaltbar
Speicher	für Messergebnisse beider Ohren
Menüprogramm	für individuelle Voreinstellungen (Messgenauigkeit, Messgeschwindigkeit usw.)

Sonde:

einstellbare Mess-Sonde mit Kontrollanzeige über mehrfarbige LED.

Audiometer (Optional):

Testfrequenzen	0,125; 0,25; 0,5; 1; 2; 3; 4; 6; 8 kHz
Pegelbereich	0 bis maximal 90 dB _{HV}
Pegelstufen	5 dB knackfrei
Luftleitungshörer	Telephonics TDH 39

Drucker:

Druckzeit	sehr leiser Thermodrucker
Anzeige	4 s / 12 s (beidohrige Messung)
Schnittstelle	Grafik LCD-Display, Kontrast einstellbar
Stromversorgung	USB

Maße und Gewicht	Netz 230 V~, 50/60 Hz, ca. 25 VA
	B x T x H: 39 x 29 x 11 cm / 2,6 kg

Normen: EN 60601-1, IEC 60645-5 Klasse 2



Gerät entspricht der Richtlinie 93/42/EWG für Medizinprodukte

Standardzubehör:

Ohrstöpselset, Sondenhalterung mit Kalibrier-volumen, Kabelabdeckung, Netzkabel, Druckerpapier

Für Audiotyp:

Luftleitungshörer TDH39, Patientenantworttaste

Im Interesse des technischen Fortschritts behalten wir uns Änderungen vor.



MAICO Diagnostic GmbH
Salzufer 13/14, 10587 Berlin
Tel.: 030/70 71 46 20, Fax-99

Zum Lonnenhohl 5, 44319 Dortmund
Tel.: 0231/92 53 14-0, Fax: -9
e-mail: vertrieb@maico.biz
Internet: www.maico-diagnostic.de